

EWO Life elektr. Dreirad 10

Das E- Dreirad bis 6 km/h ist für Personen ab 16 Jahren und bis 120 kg zugelassen und darf auf Bürgersteigen und Fußwegen benutzt werden, NICHT ABER auf der Straße.
Wir empfehlen trotzdem einen Helm!

Display und Steuerung:

3 Schlüsselstellungen:

1. Nullstellung: Display ist unbeleuchtet
2. Motor an: es erscheinen oben die Batterieladestände und links unten Zustandsanzeige (ein/aus)
3. Licht geht an: blaue Anzeige LICHT bitte immer anschalten! Rücklicht ist USB geladen. Kleinen schwarzen Knopf lange drücken. 4 rote Blinkvarianten



Variationen:

Schieben: Sattel ist schräg vorgeklappt und mit Klettband befestigt, Trittbrett ist am Magneten befestigt.

Stehen: Brett runter klappen

Sitzen: Sattel zurück klappen und gerade stellen
Sattel und Lenker sind höhenverstellbar.



Antrieb: Drehgriff zu sich hin drehen.

Nur schieben: ohne Motor oder auf Stufe 1 (ca. 2 km/h)

Stufe 2: bis 4 km/h

Stufe 3: bis 6 km/h

Werte beziehen sich auf Personen mit ca. 80 kg Gewicht

F (Forward) ist der Vorwärtsgang

B (Backward) ist der Rückwärtsgang.

Gelber Knopf: Tempomat. Während der Fahrt drücken, dann bleibt die Unterstützung bis der Bremshebel betätigt wird oder der Knopf wieder gedrückt wird.

Schwarzer Knopf: ohne Funktion


Bremsen:

Die Bremse am linken Hebel betätigt die sehr effektive Scheibenbremse am Vorderrad. Vorsicht vor zu schnellem Fahren!

Feststellbremse:

Roten Hebel ran ziehen, kleinen schwarzen Knopf/ Hebel ran ziehen bis er einrastet.

Öffnen: roten Hebel drücken, Knopf springt zurück.

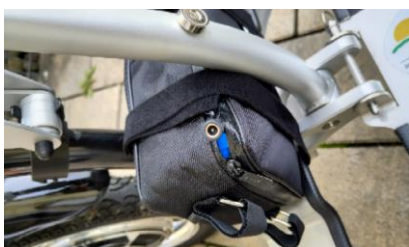

Akku und Reichweite:

Der Akku ist in der NICHT WASSERDICHTEN schwarzen Tasche verstaut. Zum Laden den Stecker des Ladegerätes an die schwarze Buchse anschließen, die während des Betriebes in der Tasche verstaut ist.

Reichweite: Ca. 20 km

Zubehör: Korb bis 5 kg



Faltschloss mit Kette



Klettband für Satttelelement



Hupe links, sehr laut



Radabdeckungen! Nicht drauf treten!



Verschluss Trittbrett



Transport:

Das EWO mit seinen 30 kg Gewicht kann zusammen geklappt werden.

Maße: 90 cm hoch, 67 cm breit, 110 lang

Vorbereitung:

Sattel in Sitzposition, nach hinten bringen, Vorderrad gerade, Korb abnehmen.

Schraube losdrehen, bis das Metallscharnier raus kommt und weggeschoben werden kann. (rechte Seite)

Jetzt lässt sich der Lenker nach links unten kippen

Sattel wieder zurück schieben.

